

Instruktioner til brug



Fodplejeudstyr Hyperios⁵ Chrome

Indholdsfortegnelse

Forord	3
Sikkerhedsinstruktioner	4
Rengøring og desinfektion	9
Kontrollementer	10
Før brug	11
Anvendelsesområde	11
Ibrugtagning	11
Brug	13
Betjeningstrin	13
Holdning under behandlingen	14
Fyld med sprøjtevæske	15
Fastspænding af fræseren	16
Indstillet hastighed	16
Hukommelsesknapper m1, m2, m3	16
Spray	16
Tørring/udskiftning af fræser	17
Fodkontakt	17
Vedligeholdelse og pleje	18
Vandtætning	18
Vandfilter	18
Rengøringsfunktion	19
Rengør spændepatron	20
Oversigt over vedligeholdelse	20
Instruktioner til håndtering	21
Fejlfinding	22
Tekniske data	24

Forord

Med Hyperios fodplejeapparat⁵ Chrome har du købt et produkt, der repræsenterer den nyeste teknologi og er fremstillet i henhold til strenge kvalitetskriterier. Da vi konstant udvikler vores produkter, er det muligt, at billederne og tegningerne i dette dokument kan afvige en smule fra det produkt, du har købt.

Denne brugsanvisning indeholder en detaljeret beskrivelse og forklarer, hvordan du bruger Hyperios⁵ Chrome. Hvis du har yderligere spørgsmål eller forslag, så tøv ikke med at kontakte os via telefon eller e-mail.

Denne brugsanvisning er en del af Hyperios⁵ Chrome. Opbevar den inden for rækkevidde. Hvis du giver dette produkt videre til en tredjepart, bedes du også medtage dette dokument, da det indeholder vigtige oplysninger om idriftsættelse og håndtering af produktet.

Kort beskrivelse af funktionerne

Hyperios⁵ Chrome er et fodplejeapparat til behandling af hård hud og negle. Håndstykket kan rumme roterende instrumenter som diamantslibere, stålskærere eller keramiske skærere. Afhængigt af apparatet roterer disse med op til 40.000 omdrejninger i minuttet og muliggør dermed effektiv fjernelse af væv. Rotationsretningen kan ændres med et tryk på en knap. Den integrerede sprøjteanordning binder pålideligt det støv, der opstår. Rotationshastigheden og sprayfunktionerne indstilles ved hjælp af membrantastaturet. Sprøjtemængden justeres ved hjælp af drejeknappen.

-  Apparatet må kun bruges af personer, der er fortrolige med apparatets funktion og betjening.
-  Installationen af arbejdsområdet skal være i overensstemmelse med de relevante bestemmelser. Placer apparatet, så ventilationsåbningerne ikke er tildækkede, og udsugningsluften let kan slippe ud.
-  For at undgå risiko for elektrisk stød må dette apparat kun tilsluttes et forsyningsnet med en beskyttende jordleder.
-  Når netstikket trækkes ud, afbrydes apparatet fra lysnettet. Placer derfor apparatet, så netstikket altid er let tilgængeligt. Hovedafbryderen skal også altid være let tilgængelig.
-  Tænd kun for styreenheden, når du holder motorhåndstykket sikkert i hånden, eller når det er i håndstykkeholderen.
-  Undgå, at der trænger væske ind i styreenheden. Det kan ødelægge de elektroniske komponenter. Træk stikket ud af stikkontakten før rengøring/desinfektion.
-  Apparatet kan kun kobles helt fra lysnettet ved at trække netstikket ud. Kontrollér kablerne regelmæssigt for skader, og få dem om nødvendigt udskiftet af et specialværksted.



Sørg for, at dit hår ikke kan blive fanget af de roterende dele, når du arbejder med apparatet. Brug et hårnet, hvis det er nødvendigt.



Hvis der frigives støv eller dampe ved bearbejdning af materialer, skal du bruge sprøjteudstyr. Brug mund- og næsebeskyttelse under bearbejdningen. Ved bearbejdning af tekniske emner skal der træffes beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med materialeproducentens anvisninger.



Af sikkerhedsmæssige årsager skal der bæres uigennemtrængelige engangshandsker og beskyttelsesbriller under behandlingen. Derudover skal der bæres en ansigtsmaske (åndedrætsværn) i overensstemmelse med EN 14683 type IIR eller EN 149 FFP 2.



Hvis der løber vand ud af apparatet, er der en fejl. Apparatet skal afbrydes fra lysnettet og må ikke længere betjenes.



Destilleret vand med desinfektionsmiddel (f.eks. AquaHy, art. 8555) bør anvendes som sprayvæske. Ved brug af andre sprøjtevæsker skal man altid følge producentens anvisninger om, hvorvidt de kan bruges. **Brug aldrig postevand (risiko for forkalkning!) eller brandfarlige eller eksplosive væsker som alkohol.** Der er risiko for brand eller eksplosion, hvis der

anvendes alkohol eller andre brandfarlige væsker. Fyld aldrig tanken over apparatet, da der ellers kan trænge vand ind i apparatet, hvis der spildes ved et uheld.



Udskift vandet dagligt. Tilsæt altid et steriliseringsmiddel til vandet. Følg producentens anvisninger. Skyl tanken regelmæssigt med frisk vand.



Sørg for, at motorhåndstykket og patientens fod (eller arbejdsemnet) har et fast greb, når du arbejder. Arbejd kun på patientens fod med let tryk og ekstrem forsigtighed for at undgå skader.



For at sikre, at værktøjet sidder godt fast i spændetangen, må du ikke arbejde med værktøjet,

- der har et fedtet værktøjsskaft,
- hvis værktøjsskaft er slidt,
- hvis værktøjsskaft er bøjet.



Før apparatet tages i brug, skal det sikres, at

- værktøjet kan skubbes langt nok ind i spændetangen (kontroller om nødvendigt med en prøvestift, og rengør),
- værktøjet ikke vipper, når det spændes fast,
- at værktøjet sidder godt fast i spændetangen,
- værktøjet er godkendt til enhedens maksimale hastighed (følg værktøjsfabrikantens

specifikationer),

- værktøjet er helt tørt.

Af sikkerhedsmæssige årsager må du kun skifte værktøj, når håndstykket er slukket. Sluk straks for apparatet, hvis

- værktøjet skal løsne sig fra spændetangen under bearbejdningen.
- motoren er blokeret under bearbejdningen.



Tøm apparatet, hvis du ikke skal bruge det i længere tid (f.eks. inden du tager på ferie). For at gøre dette skal du tømme tanken. Drej sprøjteregulatoren til MAX. Lad derefter apparatet køre i ca. 3 minutter. Sprøjtevæsken pumpes nu ud af alle slanger inde i apparatet og ud af håndstykket.



Dette apparat kan bruges af børn fra otte (8) år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de er blevet overvåget eller instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de farer, der er forbundet med det. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.



Apparatet må kun håndteres i overensstemmelse med betjeningsvejledningen. Du må ikke selv udføre reparations-, ombygnings- eller



vedligeholdelsesarbejde på apparatet. Dette arbejde må kun udføres af en fagmand. Kabinetet må aldrig åbnes, når styreenheden er tilsluttet lysnettet, da nogle af apparatets komponenter er spændingsførende. Vi påtager os ingen garanti eller ansvar for ukorrekt håndtering af styreenheden.


Rengøring og desinfektion



Enheden er beregnet til brug med roterende instrumenter, der ikke trænger ind i huden eller slimhinderne, når de bruges efter hensigten, men som stadig kan forårsage skade utilsigtet. De følgende rengørings- og desinfektionsprocedurer er også beregnet til dette formål. Følgende trin skal udføres efter hver behandling:

- Fjern først det roterende instrument (fræseren). Dette skal forberedes i henhold til producentens anvisninger.
- Fjern vævsrester fra apparatet ved at tørre det af med et stykke køkkenrulle let fugtet med postevand. Alle apparatets overflader skal derefter aftørres med desinfektionsservietter (Mikrozid AF wipes fra Schülke and Mayr).

Kontrollementer

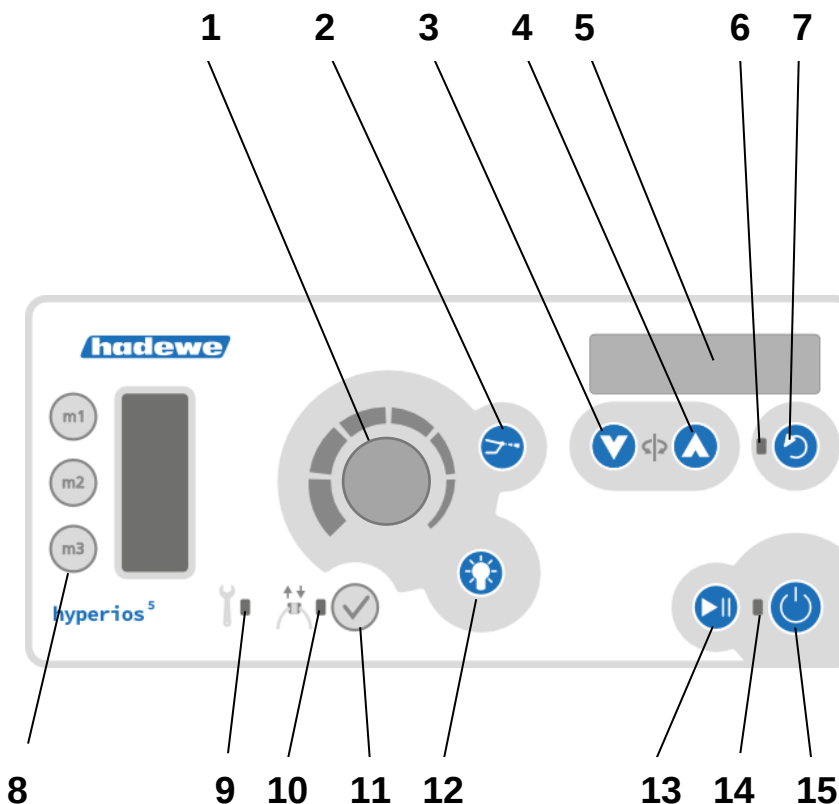

- 1 Indstil sprøjtevolumen
- 2 Tænde/slukke for sprøjtestrålen (rengøringsfunktion i standby)
- 3 Sænk hastigheden
- 4 Øg hastigheden
- 5 Visning af hastighed
- 6 LED lyser ved rotation mod uret
- 7 Skift omdrejningsretning
- 8 m1, m2, m3: Hukommelsesknapper til hastighed
- 9 LED'en lyser, når der skal udføres vedligeholdelse på serviceværkstedet.
- 10 LED lyser, når vandforseglingen skal udskiftes
- 11 Knap til nulstilling af meddelelsen "Skift vandtætning" (LED 10)
- 12 Tænd/sluk for lyset
- 13 Start/pause af håndstykkets motor og spray
- 14 LED'en lyser i standbytilstand
- 15 Tænde/slukke for enheden (standby)

Før brug

Læs venligst denne brugsanvisning grundigt igennem, før du tager apparatet i brug første gang. Vær især opmærksom på sikkerhedsanvisningerne. Opbevar brugsanvisningen på et sikkert sted.

Anvendelsesområde

Apparatet må kun betjenes af personer, der har gennemført en uddannelse som fodterapeuter. Før apparatet tages i brug, skal brugeren gøre sig bekendt med apparatet ved hjælp af denne vejledning eller være blevet instrueret i brugen af det.

Enheden må kun betjenes i lukkede rum. Det kan bruges på hospitaler såvel som i kommercielle miljøer eller husholdninger. Apparatet er ikke beregnet til brug i operationsstuer.

Fodplejeenheden kan bruges til installation i skabe eller som en bærbar enhed til kufferter. Den er velegnet til følgende anvendelsesområder:

- Fodpleje (slibe-, fræse- og poleringsarbejde),
- Manicure (slibe-, fræse- og poleringsarbejde).



Enheden er beregnet til brug med roterende instrumenter, som ikke trænger ind i huden eller slimhinderne, når de bruges efter hensigten, men som stadig kan forårsage skader, hvis de bruges utilsigtet.




Forsigtig: Sprayen skal bruges i pedicureområdet.

Idriftsættelse


Installationen af arbejdsområdet skal være i overensstemmelse med de relevante bestemmelser. Placer apparatet, så ventilationsåbningerne ikke er tildækkede, og så udblæsningsluften let kan slippe ud. For at sikre, at udblæsningsluften kan slippe uhindret ud, skal der være et mellemrum på 12 cm bag apparatet.

Placer apparatet, så betjeningselementerne er nemme at nå, og slanges udløb ikke er mere end 60 cm fra patientens fod. Placeringshøjden er 30 - 90 cm over gulvet.

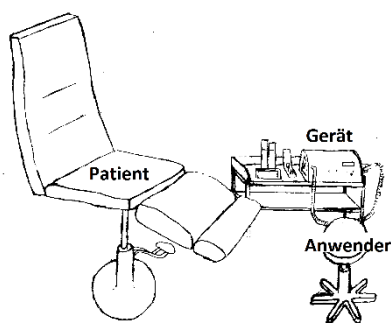

Billede: Eksempel på placering af fodplejeenheden i behandlingsrummet

Før brug

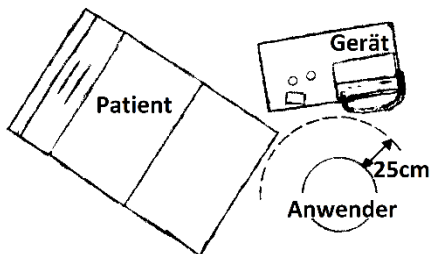

Hold håndstykket i hånden. Tryk på knappen (13) for at starte håndstykket og sprayen.

Billede: Arbejdsplads set fra fugleperspektiv

Hvis du har en fodpedal, skal du sætte stikket til fodpedalen i stikket på højre side af apparatet mærket .

Sørg for, at der er sprøjtevæske i beholderen. Kontrollér, at værktøjet er fastspændt.

Hovedafbryderen er placeret på bagsiden af apparatet. Tryk på den for at tænde for apparatet.



Betjeningstrin

Rækkefølgen af driftstrin beskrives nedenfor. Derefter beskrives de enkelte trin i detaljer. Læs hele vejledningen, før du begynder at arbejde.

Når du har fastspændt instrumentet, skal du trykke på standby-knappen (15) for at vække apparatet fra standby-tilstand. Brug knapperne (3) og (4) til at vælge den ønskede hastighed. Instrumentproducenterne giver ofte anbefalinger til den optimale hastighed. Sørg dog under alle omstændigheder for, at den maksimalt tilladte hastighed ikke overskrides. Start nu motoren ved at trykke på knappen (13).

Du kan nu bruge knappen (7) til at vælge omdrejningsretningen. Normalt arbejder man i urets retning. De fleste fræseinstrumenter (stålinstrumenter med stålskærekant) er også optimeret til at dreje med uret. Med diamantslibere eller aluminium-oxidslibere har rotationsretningen ingen indflydelse på aftrækshastigheden. Det kan være en fordel at arbejde mod uret, hvis fræsestøvet hvirvles ind i synsfeltet ved rotation med uret.

Tænd nu for sprayen med knappen (2). Du kan indstille den ønskede sprayvolumen ved hjælp af drejeknappen (1).

Når hastigheden og sprøjtemængden er indstillet, kan du begynde at arbejde. Hvis du vil afbryde arbejdet, skal du trykke på knappen (13). Brug

knappen (15) til at stoppe arbejdet. Apparatet skifter derefter til hviletilstand. Du kan nu placere håndstykket i håndstykkeholderen på højre side af apparatet.

Vi anbefaler at slukke for apparatet på hovedafbryderen, hvis det ikke skal bruges i længere tid. På den måde sparer du strøm. Stikket skal også tages ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug.

Holdning under behandlingen

De følgende billeder er eksempler på arbejdsstillinger, når man arbejder på forskellige områder af foden. Sørg altid for, at foden har et sikkert greb, og at du kan arbejde uden spændinger.





Fyld med sprøjtevæske

Sluk for apparatet. Træk sprøjte-tanken ud ved håndtaget. Hold fast i tankens låg med den ene hånd, og skru tankbeholderen af. Fyld nu med destilleret vand med steriliserings-middel, f.eks. AquaHy (art. 8555).



Overhold det maksimale påfyldningsniveau. Det er angivet på tanken og må ikke overskrides.

Skru nu tankdækslet tilbage på tank-beholderen. Sørg for, at dækslet er lukket ordentligt. Hvis der er en lækage, kan der ikke opbygges tryk. Skub nu tanken tilbage i apparatet. Tænd for apparatet på afbryderen (på bagsiden af apparatet).



Brug aldrig postevand (ri-siko for forkalkning!) eller brandfarlige og/eller eks-plosive væsker som f.eks. alkohol. Fyld aldrig tanken over apparatet, da der el-lers kan trænge vand ind i apparatet i tilfælde af util-sigtet spild.



Vandfilteret skal være helt nedsænket, ellers kan der ikke suges vand ind.



Brug kun destilleret vand sammen med AquaHy-desinfektionsmidlet. Andre sprayvæsker kan være uegnede og beskadige dit apparat. Især alkohol-baserede sprayvæsker angriber ofte slangerne og gør dem porøse.

Fastspænding af fræseren

Værktøj må kun isættes, når motoren står stille. Værktøjet sættes så langt ind i holderen, som det kan komme. Alle værktøjer med et skaft i henhold til ISO 104 med en diameter på 2,35 mm kan bruges.



Skift kun værktøj, når håndstykket er slukket.

Indstil hastighed

Tag håndstykket op (med værktøj), eller sæt det i håndstykkeholderen. Tryk på standby-knappen (15) for at vække apparatet fra standby-tilstand. Du kan nu indstille den ønskede hastighed med knapperne (3) og (4) og vælge rotationsretning med knappen (7) . Tryk på knappen (13) for at starte.

Hukommelsesknapper m1, m2, m3

Ofte anvendte hastigheder kan gemmes i hukommelsen. Der er 3 hukommelsespladser til rådighed til dette formål. Indstil først den ønskede hastighed. Gem den ved at trykke på knappen m1 og holde den nede i 4 sekunder. Tryk kortvarigt på knappen m1 for hurtigt at hente den gemte hastighed. Yderligere værdier kan gemmes med knapperne m2 og m3.

Spray

Tænd for sprøjtestrålen ved at trykke på knappen (2). I første omgang fyldes sprøjtesystemet automatisk, og der udsendes en kraftigere sprøjtestråle. Efter 7 sekunder reguleres spraymængden til den værdi, der er indstillet på drejeknappen (1).

Når apparatet eller sprøjtefunktionen slukkes, pumpes sprøjtevæsken helt ud af slangerne og tilbage i tanken. Der kan høres en boblende lyd i tanken under denne proces.

Tørring/knivskift I

Tryk på knappen (13) for at stoppe håndstykket og spraystrålen. Der kommer luft ud af dysen, som kan bruges til at tørre behandlingsområdet. Tryk på knappen igen for at genstarte håndstykket og sprayeren.



Funktionen kan også bruges til at skifte fræser, når håndstykket står stille.

Fodkontakt (art. 0970)

Idriftsættelse af fodpedalen

Brug kun originale hadewe-fodkontakter for at undgå skader. Sæt fodkontaktens stik i stikkontakten med symbolet .

Fodkontaktens funktion

Tryk og hold nede:

Tænding/slukning af enheden

Tryk kortvarigt:

Tænd/sluk for håndstykke og spray.

Når du arbejder med fodpedalen, må du kun bruge værktøj, der er godkendt til apparatets maksimale hastighed.

Vedligeholdelse og pleje

Vandtætning

Der er en hvid teflonforsegling (art. 4571) i spidsen af håndstykket. **Tætningen skal udskiftes hver 2. uge (25 driftstimer).** Ellers kan der trænge vand ind i håndstykket og forårsage skade. Hvis en udskiftning er nødvendig, lyser LED'en (10) på apparatets forside.



Bekræft forseglingsskiftet med knappen (11). Lysdioden (10) slukker.

Udskiftning af forseglingen

Løft forseglingen ud af spidsen med værktøjet (art. 6475).



Placer altid værktøjet mellem lysdioderne. Hvis du placerer værktøjet på lysdioden, kan den blive beskadiget.




Tryk nu den nye tætning ind i spidsen ovenfra.

Vandfilter

Selv de mindste partikler af snavs kan forurene dysen på håndstykket. Der er et vandfilter i tanken til beskyttelse. Du bør skifte vandfilteret to gange om året, eller når det bliver snavset. På trods af filteret skal du altid sørge for, at der aldrig kommer smudspartikler ind i tanken, og vaske den regelmæssigt.

Udskiftning af vandfilter

Skru først tankbeholderen af tankdækslet. Hold nu metaldelen (A) med den ene hånd, og skru vandfilteret (B) af. Du kan nu skru det nye vandfilter på.

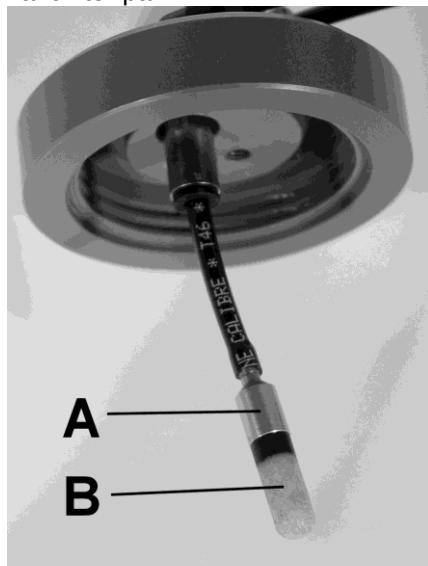

Rengøringsfunktion

Brug rengøringsfunktionen, hvis sprøjtedysen er blokeret. Sæt apparatet i standbytilstand (15). Fjern først vandfilteret (se forrige afsnit). Fyld tanken med destilleret vand. Luk beholderen, og skub den ind i apparatet. Indstil sprøjtevolumen til MAX med knappen (1). Tryk derefter på knappen (2), og hold den nede, indtil "CLEAN" vises på displayet.

Den komplette rengøringsproces tager ca. 3 minutter og slukker derefter automatisk. Du kan også afbryde rengøringsprogrammet ved at trykke på knappen (15). Under rengøringsprogrammet presses vandet helt ud af slangerne. Smudspartikler i vandsystemet skylles ud i tanken. Stop derfor med at bruge vandet, og rengør tanken grundigt. Skyl også filteret grundigt fra alle sider med vand, og sæt det derefter i igen. Brug altid rengøringsfunktionen med det samme, hvis dysen er blokeret, da snavspartiklerne kan klæbe sammen, hvis du venter længere.



Rengøring er kun nødvendig, hvis sprøjtedysen er blokeret, og behøver ikke at blive udført under problemfri drift.

Rengør spændepatronen

H yp erios⁵ Chrome kræver ikke, at brugeren renser spændepatronen.

Vedligeholdelse og pleje

Oversigt over vedligeholdelse

Hvad er der?	Hvor ofte? Af hvem?
Spændepatron ren	månedligt af brugere
Skift vandforsegling	hver 2. uge (25 driftstimer) af brugeren
Udskiftning af vandfilter	hver 6. måned af brugeren
Vedligeholdelse på specialværksted (udskiftning af sliddele, kontrol af hus, rengøring, lækstrøm)	Hver 250. driftstime af et specialværksted  LED'en lyser rødt

Instruktioner til håndtering



Anbring aldrig det motoriserede håndstykke i en væske, og smør det ikke ind i olie. Sørg for, at der ikke trænger fugt ind i det motoriserede håndstykke under rengøring og desinfektion. Brug ikke desinfektionsspray.



Placer altid håndstykket, så spidsen peger nedad for at forhindre, at udstrømmende væske løber ind i håndstykket.



Fastspænd aldrig våde fræsere. Det vil føre fugt ind i håndstykket, hvilket kan føre til skader.



De materialer, som hawewe bruger, udelukker rustdannelse. I de tilfælde, hvor man finder rust i håndstykket, viser tests gentagne gange, at det skyldes rust, der kommer udefra og stammer fra værktøj. Rust kan endda dannes på instrumenter i rustfrit stål fra velrenommerede producenter, f.eks. på grund af forkert behandling med kemiske rengørings- og desinfektionsmidler. Uvedkommende rust sætter sig i håndstykket i form af flyverust og fører til rusthuller. Når du ikke arbejder med håndstykket, må du derfor ikke efterlade noget værktøj fastspændt i håndstykket.



Sørg for, at du ikke taber motorhåndstykket eller udsætter det for stød. Det kan beskadige kuglelejerne og motoren.



Arbejd kun med værktøj, der er i perfekt stand. Arbejd ikke med værktøj,

- som er bøjet,
- der har en ubalance,
- hvis aksel er slidt eller
- der er rustne.



Arbejde med værktøj, der ikke er i perfekt stand, medfører øget vibration af motorhåndstykket. Dette kan resultere i beskadigelse eller ødelæggelse af lejerne, spændeanordningen og motoren.



At arbejde med et for højt tryk øger ikke arbejdsydelsen, da motoren bliver langsommere. En anden ulempe er den øgede belastning på motor og lejer.

Fejlfinding

Håndstykket vibrerer, larmer eller bliver varmt i det forreste område.

Brug af bøjet fræser → Brug om nødvendigt en anden fræser (fræseren kan kontrolleres for bøjning med fræse-testmåler 4990).

Den maksimalt tilladte hastighed for fræseren er overskredet, hvilket resulterer i øgede vibrationer. → Overhold fræserproducentens anvisninger.

Kniven er svær at sætte ind i håndstykket.

Brug af bøjet fræser → Brug om nødvendigt en anden fræser (fræseren kan kontrolleres for bøjning med fræse-testmåler 4990).

Spændepatronen er snavset. → Rengør spændepatronen i henhold til anvisningerne i brugervejledningen.

Fræseren fastspændes ikke (roterer).

Spændepatronen er ikke spændt korrekt. → Spænd spændepatronen i henhold til anvisningerne i brugervejledningen.

Håndstykkets knap er svær at betjene.

Spændepatronen er snavset. → Rengør spændepatronen i henhold til anvisningerne i brugervejledningen.

Gummiringen under knappen sidder fast, når den aktiveres. → Drej gummiringen 180°.

Ingen sprøjtevæske slipper ud.

Trykket kan ikke opbygges, fordi tankdækslet ikke er lukket ordentligt.

Smudspartikler blokerer vandgennemstrømningen i spraysystemet. → Rengør i henhold til anvisningerne i brugervejledningen.

Det blå vandfilter i tanken er blevet tilstoppet. → Udskift vandfilteret.

Enheden har slet ingen funktion.

Kontrollér, at hovedafbryderen på bagsiden er tændt.

Fodkontakten er konstant aktiveret eller defekt. → Tag fodkontaktens stik ud af stikkontakten for at teste den.

Træk netstikket ud for at nulstille apparatet.

Der slipper ikke mere sprøjtevæske ud efter længere tids brug.

Fejlfinding

Apparatet er overophedet. → Ventilationsåbningerne skal være frie, lad apparatet køle ned.

Enheden er højlydt forskellige steder.

Apparatets lydstyrke varierer afhængigt af underlaget. Hvis apparatet er placeret direkte foran en væg, vil lyden blive reflekteret kraftigere, end hvis det er placeret længere væk fra væggen.

Håndstykkets motor hakker kortvarigt (ca. 1 sekund), når den tændes.

Denne effekt kan forekomme i sjældne tilfælde. Effekten beskadiger ikke enheden.

HS, EE i display

Motoren kan ikke starte, fordi spændepatronen er åben. → Indsæt og fastspænd fræseren (tryk knappen ned). Start derefter håndstykket med den maksimalt tilladte hastighed.

Sprøjtestrålen hakker.

Der er stadig luftbobler i sprøjtesystemet. Efter 5 minutters drift skulle stammen forsvinde af sig selv.

Sæt fart på sprøjtestrålen.

Tip: For at forkorte sprøjtestrålens starttid skal du dreje

sprayvolumen til maksimum, efter at du har tændt. Juster først sprøjtevolumen, når sprøjtestrålen er kommet ud.

Der siver vand ud.

Fyld ikke mere vand på end angivet med pilene på tanken.

Tekniske data

0588 Hyperios⁵ Chrome

Samlet vægt: 2,6 kg
Dimensioner: B245xH133xD190mm
Forsyningsspænding: 230V ~, 50Hz
Strømforbrug: 4A
Primær sikring:
F1, F2: 4A inert, fus.
Sikring Sek: Termisk sikring
Beskyttelsesklasse II
Hastighedsvisningens nøjagtighed: ±10

Håndstykke:
Diameter: 17-21 mm
Længde: 116 mm
Hastighed: 6000-40000 o/min
Vibration <2,5 m/s²

Tilbehør og reservedele

Vare

nr.

0970	Fodkontakt
3497	Vandfilter
4571	Pakning
8555	AquaHy

Klemmesystemet er designet til roterende instrumenter med en skaftdiameter på 2,35 mm i overensstemmelse med EN ISO 1797.

Driftstid

Apparatet er konstrueret til kontinuerlig drift.

Omgivende forhold

Apparatet er beregnet til brug i tørre, lukkede rum.

Operation:

Temp.: +10 °C til +26 °C
Relativ luftfugtighed: 25% til 75%
(ikke kondenseret)
Lufttryk: 700 hPa til 1060 hPa

Opbevaring:

Temperatur: -5 °C til +55 °C
Relativ luftfugtighed: 10% til 95%
(ikke kondenseret)
Lufttryk: 500 hPa til 1060 hPa

Transport (op til 4 uger):

Temperatur: -5 °C til +55 °C
Relativ luftfugtighed: 10% til 95%
(ikke kondenseret)
Lufttryk: 500 hPa til 1060 hPa

Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer på eget ansvar, at produktet pedicureapparat 0588 er i overensstemmelse med følgende direktiv:

2014/30/EU EMC-direktiv

2014/35/EU Lavspændingsdirektiv

hadewe GmbH - Grambartstraße 10
30165 Hannover

Sikkerhedsrelateret Undersøgelse

Apparatet skal underkastes et årligt sikkerhedseftersyn i henhold til DGUV regel 3 (tidligere BGV A3).

Bortskaffelse af affald



Apparatet og filteret kan indeholde smitsomt materiale, f.eks. rester af slibestøv eller vævsrester. Derfor skal instruktionerne for bortskaffelse beskrevet nedenfor overholdes hurtigst muligt.

Bortskaffelse af apparater

I henhold til loven om elektrisk og elektronisk udstyr skal gamle apparater, der er købt i Tyskland, sendes direkte til producenten (hadewe). Bortskaffelse hos os er gratis. Apparatene må ikke afleveres til de offentlige affaldsmyndigheder (WEEE-Reg.-No.- DE20392713, b2b device). For hadewe-enheder, der er købt i udlandet, bedes du kontakte importøren.

Tekniske data

Symbol



Pas på! Fare!



Vigtig bemærkning!
(blå farve)



Instruktioner til brug
Bemærk! (blå farve)



Temperaturbegrænsning
(henvielse til en øvre og nedre
temperaturgrænse)



Lufttryk: tilladt område



Luftfugtighed: tilladt område



Hold dig tør!



Tænde/slukke for enheden
(ingen netafbrydelse i standby)



Skift omdrejningsretning



Spray ON/OFF



Indstil sprøjtevolume



Lys ON/OFF



Roterende bevægelse

m1 m2
m3

Opkald til hastighed eller
gemme



Vedligeholdelse på service-
værksted påkrævet



Udskiftning af vandfilter



Bekræft skift af vandfilter



Start/pause



Vekselstrøm



Jævnstrøm



Smelteligt led



Beskyttelsesklasse II



Stikkontakt til fodkontakt



Fremstillingsdato,
navn og adresse
af producenten



Produktet må ikke bortskaffes
sammen med husholdningsaf-
fald.



hadewe GmbH
Grambartstraße 10
30165 Hanover
Tyskland
info@hadewe.de
www.hadewe.de